

MODE D'UTILISATION



Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique (NaCl à 0,9%).



Enlever le capuchon à ailettes comme indiqué sur le flacon et le conserver car il vous servira à reboucher le flacon après utilisation.



Saupoudrer Coalgan® POUDRE sur la plaie ou dans la coupure. L'excédent de poudre tombe naturellement. Recouvrir si nécessaire la plaie ou coupure avec un Coalgan® ADHÉSIF. Ne pas essayer de retirer la poudre de la plaie, cette dernière sera éliminée avec le caillot sanguin (croûte).

COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

Coalgan® POUDRE est constituée de poudre d'alginate de calcium* bio-active.
* Issu d'algues marines.

- ↳ Arrête rapidement le saignement : l'alginate de calcium favorise l'agrégation des plaquettes et diminue le temps de coagulation.
- ↳ Favorise la cicatrisation : l'alginate de calcium stimule les cellules clés de la cicatrisation, activant ainsi les défenses contre les micro-organismes et les bactéries. Les risques de complication dermatologiques sont ainsi réduits.

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

Aucuns connus à ce jour.

INTERACTIONS

Coalgan® POUDRE ne doit pas être utilisée avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec du sérum physiologique (NaCl à 0.9%) avant d'appliquer Coalgan® POUDRE.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Coalgan® POUDRE peut être utilisée pendant 6 mois après ouverture.



Les Laboratoires Brothier 41, rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex - France

BROTHIER

Site de production : 49590 Fontevraud l'Abbaye • Tel : +33 (0) 1 56 38 30 00 - info@brothier.com

Coalgan®
www.coalgan.com
POUDRE




Arrête le saignement

Plaies du cuir chevelu
Coupures de rasoir
Ecorchures, égratignures
Erythèmes fessiers

Poudre hémostatique
bio-active stérile

8 g

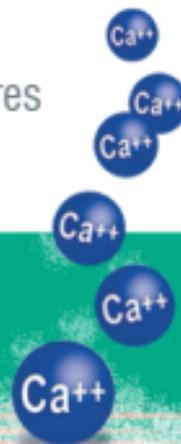

CE
0459